



KÓD 31075 5 x 1 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích.

PROTEINOVÝ KALIBRÁTOR

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proteinový kalibrátor je určen pouze pro kontrolu kvality a je dodáván v navrhovaných intervalech akceptovatelných hodnot.

SLOŽENÍ

Proteinový kalibrátor. Kapalné lidské sérum obsahující několik bílkovin v koncentracích vhodných pro kalibraci měřicího procesu v laboratoři.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Kalibrátory jsou připraveny k přímému použití- ready for use. Před otevřením lahvičku vytemperujte na pokojovou teplotu a opatrně promíchejte, aby nedošlo ke vzniku pěny. Proteinový kalibrátor analyzujte stejným způsobem jako vzorky pacienta.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8°C. Proteinové kalibrátory jsou stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky, pokud je skladováno dobře uzavřené a je zabráněno jeho kontaminaci.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Hodnoty koncentrací pro jednotlivé komponenty včetně návazností jsou uvedeny v tabulce originální příbalové informace. Dohledatelnost údajů z genealogie výrobku, výrobní série nebo šarže - mezinárodně nazývanou Traceability je možné získat podle

referenčních metrologických postupů a to pouze za předpokladu, že kalibrátor byl použitý s reagensy společnosti BioSystems. Doporučené intervaly byly stanoveny na základě předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě stanovení. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Každá laboratoř by si měla stanovit své vlastní parametry přesnosti.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 19.1.2018. Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese: www.biosystems.es.

Český návod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha5, tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

ČR : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK, tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informační centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

VÝROBCE

BioSystems S.A. Costa Brava 30, Barcelona (Spain)
ISO 13485 - TÜV Rheinland - Reg.: SX 60010383 0001
ISO 9001 - TÜV CERT - Reg.: 01 100 6696