


společnost JK-Trading, spol.s r.o.,
dovozce In vitro diagnostik do ČR a SR,
Vám představuje:

screeningový test pro rychlou diagnostiku chlamydiové infekce,

kteřý lze provádět i v ordinaci lékaře-specialisty. V případě provedení testu ze stěru není potřeba žádného přístrojového vybavení. Při provedení testu ze vzorku moče je třeba malá centrifuga.

Princip testu:

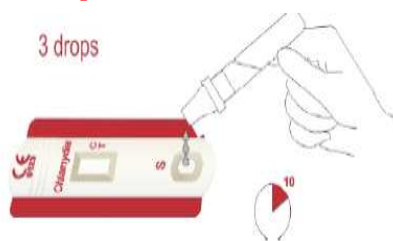

Vzorek: Stěr z endocervikálního kanálku u žen. U mužů stěr z uretry, nebo vzorek ranní moče.

Antigen chlamydia trachomatis se extrahuje ze vzorku do směsi činidel ve zkumavce. Víčko zkumavky je opatřeno kapátkem, kterým se aplikují 3 kapky vzorku na testovací kazetku.

Během 10 minut se vytvoří barevné linie, podle kterých se vizuálně hodnotí přítomnost antigenu Ch. trachomatis.

Charakteristika testu ve srovnání s PCR – dle firemních materiálů:

	Stěr z cervixu	Stěr z uretry	Moč u mužů
Relativní senzitivita	88,5%	78,5%	90,9%
Relativní specifita	96,7%	92,9%	>99%
Správnost	93,7%	88,3%	96,5%

Balení:

Krabice Chlamydia test card 004A170 obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, označené lahvičky s roztoky A a B, 20 ks speciálních COPAN odběrových tamponů pro ženy, 20 ks extrakčních zkumavek, 20 ks víček s kapátkem a jednorázový stojánek na zkumavky. Český návod je přiložen. Soupravy Chlamydia test card 004A170 jsou dodávány s přibližně roční expirací.

Cena vč. 14% DPH: 1.204,-Kč/ balení t.j. 60,- Kč/test

Pro odběr vzorku u mužů lze dokoupit mužský odběrový tampon v ceně 10,40,-Kč vč. DPH.

Pro odběr vzorku u žen lze dokoupit ženský odběrový tampon v ceně 10,40,-Kč vč. DPH.

Pro odběr vzorku u žen a transport vzorku lze dokoupit suchý odběrový tampon v uzavřené sterilní zkumavce – cena na vyžádání.

Další nabídku rychlých testů nejen pro gynekologické ordinace, včetně návodů, najdete na:
<http://www.jktrading.cz> / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..

Nabídka platná od ledna 2012



Diagnostika antigenu