



Rychlé testy na záchyt drog v moči

Výrobce: Ulti-med Products GmbH, Německo

Distributor: JK-Trading s.r.o, Za Opravnou 5, 150 00 Praha-Motol, tel: 257 220 760

Návod k použití testovací kazetky:

Bezpečnostní upozornění:

Test je určen pouze pro profesionální použití jako in vitro diagnostikum. Kazety nepoužívejte k testování po uplynutí doby jejich expirace. Se vzorky moče pracujte jako s potencionálně infekčním materiálem a zachovávejte všechna bezpečnostní opatření.

Uskladnění:

Testy uchovávejte v suchu, při teplotě do 28°C, nezmrazujte je! Pokud byly uskladněny v chladničce, vytemperujte je ještě před otevřením na pokojovou teplotu !

Postup:

1. Připravte vzorek moči a testovací kazetu vytemperujte ji na pokojovou teplotu (15-30°C).
2. Neotvírejte obálku s kazetou, dokud jste vše nepřipravili k testování.
3. Vyjměte kazetu z foliového sáčku a umístěte ji na rovnou podložku.
4. Přiloženým kapátkem aplikujte 5 kapek moči (180 µl) do jamky na kazetce.
(Pozor: Nedotýkejte se přitom testovacího políčka!)
5. Výsledek odečtěte po 5 - 10 minutách. Pro odečet je směrodatný výsledek v 10 minutě.

Interpretace nálezů:

Pozitivní nález:


V testovacím poli vznikne jedna růžová linie v kontrolní oblasti C. V oblasti testu T linie nevznikne !

Negativní nález:

V testovacím poli se objeví 2 barevné linky zbarvené růžově až nahnědle s různou intenzitou (1 v oblasti C a 1 v oblasti T).

Nehodnotitelný výsledek:

Test je neplatný, pokud se neobjeví žádný proužek v kontrolní oblasti C .

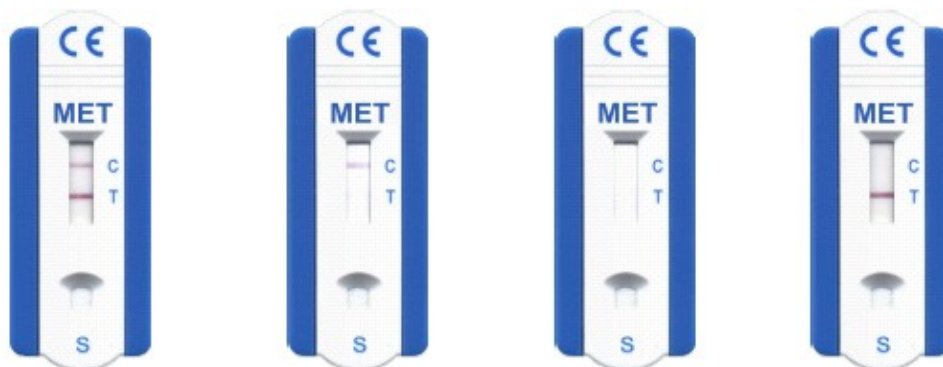

negativní

pozitivní

neplatný

neplatný

Invalid

Návod

přeložen k datu 26.11.2008

Plnou verzi návodu najdete na www.jktrading.cz v katalogu produktů/drogová diagnostika.