

## Stručná informace a návod k použití k testu na orientační stanovení alkoholu v krvi od 0,2‰ do 3‰.

### Bezpečnostní opatření

Výsledek **Dry-ve Control** testu se odečítá vizuálně. Výsledek testu lze vztáhnout na koncentraci alkoholu v krvi. Použitý testovací proužek se z bezpečnostního hlediska považuje za infekční materiál, proto se doporučuje jej vrátit do původního obalu a zlikvidovat podle platných předpisů. **Dry-veControl** test nepoužívejte po uplynutí data expirace, uvedeného na obalu.

### Pracovní postup

Pozn. Před začátkem testu - nejméně 15 minut - by neměla testovaná osoba nic vkládat do úst a to včetně nealkoholických nápojů, tabákových výrobků, kávy, mentolových bonbonů, jídla, atd.

1. Otevřete obálku a vyjměte testovací proužek. Prohlédněte si polštářek (políčko) na konci proužku, které má mít světle krémovou barvu. Pokud je toto políčko tmavší, nebo jakkoliv jinak zbarveno, nesmí být test použit.
2. Nasákněte políčko (polštářek) testu slinami: přímo vložení do úst (na jazyk), nebo do odběrové nádoby se vzorkem a okamžitě začněte měřit čas.
3. Po dvou minutách odečtěte barevnou změnu reakčního políčka (pokud k ní došlo). Zbarvení od nazelenalé po tmavší modrou indikuje přítomnost alkoholu, tedy pozitivní výsledek. Výsledek, odečtený za déle než 3 minuty může být chybně interpretován !
4. Porovnejte zbarvení testovacího políčka se stupnicí na obálce **Dry-ve Control** testu. Tak přibližně odhadnete koncentraci alkoholu v krvi.

### Výsledek

Změna barvy políčka je v rozmezí od světle zelené, (odpovídá přibližně 0,02% = 0,2‰ alkoholu v krvi), po tmavě šedomodrou barvu (odpovídá přibližně 0,30% = 3‰ alkoholu v krvi). Nález, kde nedošlo k barevné změně hodnotte jako negativní. Nazelenalé zbarvení, světlejší než odpovídá prvnímu barevnému políčku stupnice, hodnotte jako slabě pozitivní nález na přítomnost alkoholu v koncentraci nižší než 0,02% = 0,2‰.

### Skladování a stabilita testu

**Dry-ve Control** test skladujte za pokojové teploty nepřesahující 27°C. Za těchto podmínek si test zachovává správnou funkci až do data expirace uvedeného na obalu. Vzestup teploty nad 27°C může způsobit degradaci enzymatického testu a následně nesprávný výsledek.

Dodavatelem **Dry-veControl** testu v ČR je:

**JK-Tradina**, spol. s r.o., Za Opravnou 5, 150 00 Praha 5, tel: 257 220 760, email: praha@iktrading.cz, www.iktrading.cz