

**PROTEINOVÝ KALIBRÁTOR**

KÓD 31075 5 x 1 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C
Pouze pro laboratorní <i>in vitro</i> diagnostiku

POPIS PRODUKTU

Proteinový kalibrátor je tekuté lidské sérum o pěti koncentracích obsahující několik proteinů v koncentracích vhodných pro kalibraci měřících procesů v laboratoři.

OBSAH A SLOŽENÍ

Proteinový kalibrátor. 5 lahviček po 1 ml. Lidské sérum.

Složení: Přesné složení viz. Originální příbalový leták.

IgG, IgA, IgM, C3, C4, Transferin.

Lidská séra použitá při přípravě proteinového kalibrátoru byla testována a shledána negativní na přítomnost protilátek anti-HIV a anti-HCV, a stejně tak na HBs antigen. Nicméně zacházejte s kalibrátorem jako s potenciálně infekčním materiálem.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Kalibrátor je ready for use. Před otevřením lahvičku vytemperujte na pokojovou teplotu a opatrně promíchejte, aby nedošlo ke vzniku pěny. Opatrně otevřete lahvičku aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Składujte při 2-8°C.

Lyofilizované proteinové kontrolní sérum je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky, pokud je skladováno dobře uzavřené a zabráněno jeho kontaminaci.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Hodnoty koncentrací pro jednotlivé komponenty jsou uvedeny v tabulce originálního příbalového letáku. Dohledatelnost údajů z genealogie výrobku, výrobní série nebo šarže - mezinárodně nazývanou Traceability je možné získat podle referenčních metrologických postupů a to pouze za předpokladu, že kalibrátor byl použitý s reagensy společnosti BioSystems

UPOZORNĚNÍ

Překlad byl pořízen k datu: 7.8.2010

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem. Více informací můžete nalézt na internetové adrese: www.biosystems-sa.com. nebo na adrese výhradního distributora pro ČR: www.jktrading.cz