



ASO STANDARD O VYSOKÉM TITRU PROTILÁTEK šarže 005AA



kód 31194 1 x 0,5 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C
Pouze pro laboratorní <i>in vitro</i> diagnostiku

POPIS PRODUKTU

ASO standard o vysokém titru protilátek je určen pro přesnější kalibraci při stanovení ASO protilátek turbidimetrickou metodou v klinických laboratořích. Standard neobsahuje konzervační látky, které by mohly interferovat při testování.

OBSAH A SLOŽENÍ

ASO standard 1 x 0,5 mL. Lyofilizovaný lidský hemol yzát.

Lidská séra použitá pro výrobu této kontroly byla testována a shledána negativní na přítomnost protilátek anti-HIV a anti-HCV, a stejně tak na HBs antigen. Nicméně zacházejte s kontrolou jako s potenciálně infekčním materiálem.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8°C.

Lyofilizovaný standard je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky.

Rozpuštěný standard je stabilní 1 měsíc při 2-8°C.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 0,5 mL destilované vody.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechejte jí stát 5-10 minut při pokojové teplotě.
4. Opatrně promíchejte, zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění lyofilizátu.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Uvedená hodnota byla získána na základě mezilaboratorních testů a za použití přesně specifikovaných metod.

Údaje výrobce:

High level ASO standard LOT: 005/AA

Koncentrace turbidimetricky: 520 IU/ml +/- 16,6 IU/ml

95% pravděpodobnost = 3,2%

CV= 1,10%

Expirace: 03/2011

Titrační jednotky dle atestu SZÚ oddělení streptokoky a enterokoky Praha:

Titř standardu ASO je 640 IU/ml.

Titř byl stanoven akreditovanou standardizovanou spektrofotometrickou metodou. Kopii atestu zasílá společnost JK-Trading na vyžádání.

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace se považují za správné k datu překladu 1.5.2009 a vylučuje se jakákoliv záruka ve spojení s finálním použitím produktu, jelikož příjemce je poslední subjekt zodpovědný za použití výrobku podle příbalového letáku výrobce a za dodržování místních předpisů platných u jednotlivých případů.