

## Stručný návod k provedení testu GONO testu card 014B500



### Odběr vzorku:

Použijte odběrový tampon, který je součástí soupravy, nebo jiný dakronový tampon s násadou.

Pacient - muž: Pro odběr vzorku použijte stírací tampon a postupujte následující doporučenou metodou: Setřete výtok z močového traktu. Pokud není výtok přítomen, vstrčte tampon 2-3 cm do močové trubice, jemně jím pohybujte a několikrát otočte, pak tampon vyjměte zpět.

Pacientka - žena: Setřete výtok z otvoru vagíny, pak vložte tampon do vagíny na půl minuty a opět jej vyjměte. Nenavlhčujte předem tampon fyziologickým roztokem!

### Úprava vzorku:


Tampon se stěrem vložte do mikrozkušavky a přidejte 6 kapek (300 µl) ředícího roztoku 1 na tampon. Otáčejte jím a vymačkávejte tekutinu proti stěně zkumavky. Pak vyjměte tampon (a likvidujte v biohazard kontejneru).

Do zkumavky přidejte 2 kapky (100 µl) ředícího roztoku 2 a dobře promíchejte. Takto připravený vzorek může být testován hned, nebo uložen v chladničce při 4-8°C a testován během 24 hodin.

### Provedení testu

Testovací kazeta i vzorek v uzavřené obálce musí být předem vytemperovány na pokojovou teplotu (15-30 °C).

1. Obálku otevřete odtržením podél označeného zářezu. Vyjměte testovací kazetu z obálky a použijte ji co nejdříve.
2. Nasajte zředěný vzorek do přiložené pipetky a aplikujte 3- 4 kapky (cca 0,2 ml) do jamky pro vzorek (S) na kazetě.
3. Vyčkejte tvorby zbarvení, které postupuje membránou a přitom vytváří barevné linie v testovacím okně.  
V závislosti na koncentraci bakterií ve vzorku může být pozitivní výsledek pozorován již během několika sekund. Pro potvrzení negativního nálezu musí být test hodnocen až ve 20. minutě. Test se nedoporučuje odečítat později než za 20 minut.

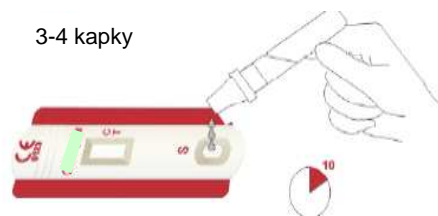

### Interpretace výsledků



**Negativní nález:** Jedna barevná linie pouze v oblasti C (kontrolní). V oblasti testu (T) se linie nevytvořila.

**Positivní nález\*:** Dvě barevné linie, jedna v oblasti testu (T), druhá v kontrolní oblasti (C)

**Neplatný nález:** pokud **chybí linie v kontrolní oblasti C** je chyba v postupu nebo množství aplikovaného vzorku, výsledek je **nehodnotitelný** (bez ohledu na vznik barevné linie v oblasti T). Doporučuje se zopakovat test s novou kazetou.

Pozn. \*Linie v oblasti T a C se mohou lišit barevným odstínem

\*\* krev ve stěru může způsobit falešně pozitivní výsledek

Pozn. distributora. Test detekuje souhrnně antigeny Neiserií (Gonorrhoeae, Lactamica, Species, Meningitidis)

Pro ČR dodává : **JK-Trading s.r.o.**, Za Opravnou ,150 00 Praha-Motol,tel: 257 220 760,email: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)