

**Belgicko-německý  
Výrobce a společnost  
JK-Trading spol.s r.o.,  
dovozce IVD a vakcín  
v ČR Vám představuje:**


**ulti  
med**

**Platnost od ledna 2012**

## **Okultní krvácení – FOB *objednáací číslo 010A210***

Test na principu chromatografické imunoassaye detekuje specifickou reakci pouze lidský hemoglobin. Před vyšetřením není třeba dodržovat speciální dietu. Vyšetřovaná osoba by ale měla 48 hodin před testem vysadit alkohol, aspirin a léky, které dráždí GIT. Souprava obsahuje i zachytávací klozetový papír na stoličce, aby nedocházelo k její kontaminaci s prostředím. Test se neprovádí má-li pacient hemoroidy, nebo krev v moči, během menses a 3 dny předem a po ní, kvůli možné falešné pozitivitě.

Citlivost testu 40 ng/ml. Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce a jednoduchost stanovení.

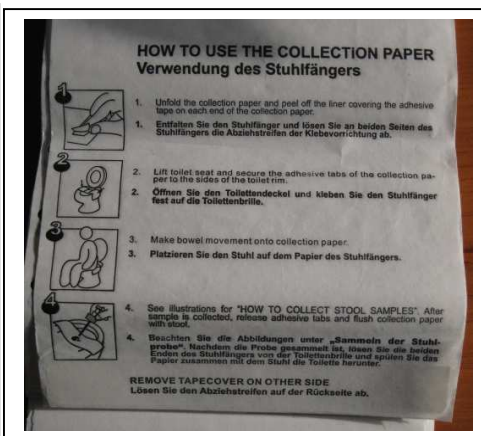

**Cena včetně 14% DPH: 840,-Kč/ balení, t.j. 42,- Kč/test vč. DPH.**

### **ULOŽENÍ, STABILITA VZORKU, EXPIRACE, HODNOCENÍ**

Soupravu FOB můžete skladovat mezi 4-30°C. Odebraný vzorek může být uložen v odběrové zkumavce za pokojové teploty až 14 dní ( při 4-8°C až měsíc). Expirace soupravy je až 15 měsíců. Pozitivní, či negativní výsledek, včetně ověření správného provedení testu se odečítá z testovací kazety na základě vzniku barevných linií v určených polích.



Pozitivní      negativní      nehodnotitelné

### **Výhoda testu oproti jiným soupravám:**

Souprava obsahuje zachytávací samolepící klozetový papír, aby stolice nepřišla do styku s prostředím klozetové mísy.

Personál ordinace nepřichází do styku se stolicí. Vzorek je uzavřen v odběrové nádobce, odkud se přímo kape na testovací kazetu.

Není třeba dodržovat zvláštní dietu před provedením testu.

## **Okultní krvácení – Hemoglobin /Haptoglobin k.č. 010A300**

Dvojitý test na jedné kazetě pro odlišení typu krvácení z gastrointestinálního traktu. Citlivost obou testů 25 ng/ml. Balení po 20 ks jednotlivě balených kazetek.

**Cena včetně 14% DPH: 1.761,-Kč/ balení, t.j. 88,- Kč/test vč. DPH.**

**Další širokou nabídku rychlých testů nejen do ordinací, včetně návodů, najdete na:**

***http:// [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz) / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..***



Objednávky vyřizuje:  
**JK-Trading s.r.o.**, Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín,  
tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772,  
email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:  
Východní a Střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604  
Západní, Severní a Jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603  
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623