

**Belgicko-německý
Výrobce a společnost
JK-Trading spol.s r.o.,
dovozce IVD a vakcín
v ČR Vám představuje:**

**ulti
med**

Nabídka pro rok 2010

Okultní krvácení – FOB objednáčíslo 010A210

Test na principu chromatografické imunoassaye detekuje specifickou reakcí pouze lidský hemoglobin. Před vyšetřením není třeba dodržovat speciální dietu. Vyšetřovaná osoba by ale měla 48 hodin před testem vysadit alkohol, aspirin a léky, které dráždí GIT. Souprava obsahuje i zachytávací klozetový papír na stolici, aby nedocházelo k její kontaminaci s prostředím. Test se neprovádí má-li pacient hemoroidy, nebo krev v moči, během menses a 3 dny předem a po ní, kvůli možné falešné pozitivitě.

Citlivost testu 40 ng/ml. Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce a jednoduchost stanovení.

Cena včetně 10% DPH: 849,-Kč/ balení, t.j. 42,- Kč/test vč. DPH.



ULOŽENÍ, STABILITA VZORKU, EXPIRACE, HODNOCENÍ

Soupravu FOB můžete skladovat mezi 4-30°C. Odebraný vzorek může být uložen v odběrové zkumavce za pokojové teploty až 14 dní (při 4-8°C až měsíc). Expirace soupravy je až 15 měsíců. Pozitivní, či negativní výsledek, včetně ověření správného provedení testu se odečítá z testovací kazety na základě vzniku barevných linií v určených polích.



Pozitivní negativní nehodnotitelné (neplatné)

Výhoda testu oproti jiným soupravám:

- Souprava obsahuje zachytávací samolepící klozetový papír, aby stolice nepřišla do styku s prostředím klozetové mísy.
- Personál ordinace nepřichází do styku se stolicí. Vzorek je uzavřen v odběrové nádobce, odkud se přímo kape na testovací kazetu.
- Není třeba dodržovat zvláštní dietu před provedením testu.

Další širokou nabídku rychlých testů nejen do ordinací, včetně návodů, najdete na:
<http://www.jktrading.cz> / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Východní a Střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Západní, Severní a Jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623

Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín,
tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772,
email: paha@jktrading.cz