

SureScreen Reader



je optoelektronický reader pro objektivní odečet a archivaci nálezů screeningových testů na drogy z moče i ze slin nejen na laboratoři, ale i v terénu při spojení s přenosným PC-notebookem.

SureScreen® Reader zajišťuje věrohodnou dokumentaci výsledků testů, protože na uschovaných testech se pozorované zbarvení s časem může měnit, není stabilní.

Zabudovaná kamera udělá současně snímek (nebo jej nafilmuje) nálezu chromatografické linie, včetně kontrolní linie.

Tento snímek se přenesení přes USB port do externího počítače-notebooku.



SureScreen® Reader obsahuje 5 typů vkládacích výměnných držáků pro testy z moče :

Multi DrugControl-5 / 6 / 10 - panely

DrugControl kazety - jednotlivé

DrugControl stripy - jednotlivé

pro testy ze slin:

SalivaScreen® 3 Parameter Ultimed

SalivaScreen® 6 Parameter Ultimed

Výhody použití SureScreen® Readeru

▪ **Přístroj je napájen přes USB konektor a tak je možné jej používat nejen v laboratoři ale i společně s přenosným PC kdekoli v terénu.**


▪ Archivace výsledků testu společně s údaji pacienta (možnost vložení dalších údajů do přídatných polí v programu) a fotografií nálezu testu v jedné databance umožňuje pozdější zpracování naměřených dat.

▪ Přístroj podává **vyhodnocení výsledku s vysokou výpovědní hodnotou zejména v oblasti nálezů 20% okolo cut-off** koncentrace, kde je subjektivní vizuelní hodnocení nejisté. Přesto v koncentracích nad limit cut-off **jasně pozitivních** není možno provést semikvantitativní vyhodnocení. **Nelze** tedy očekávat informaci, zda bylo zneužito velké, nebo malé množství drogy.

Orientační cena bez 20% DPH = 19.563 Kč (22.275 Kč vč. DPH)

Příklad zobrazení kamery

a vyhodnocení nálezu

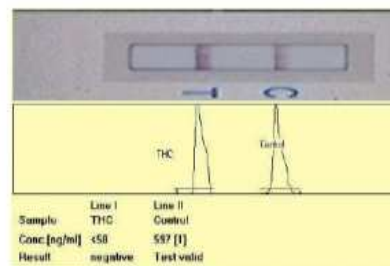

jednoduché připojení Sure Screen readeru k počítači

vložení víceparametrového panelu



Distributorem drogových testů i SureScreen Readeru firmy **ultimed** pro ČR a SR je společnost :

JK-Trading s.r.o.

Křivatcová 421/5 155 21 Praha 5 – Zličín: tel: 257 220 760, fax: 257 220 772

e-mail: paha@jktrading.cz Další informace k readeru a testům na drogy na: www.jktrading.cz