

a
společnost **JK-Trading, s. r.o.**,
dovozce *In vitro* diagnostik a vakcín v ČR
Vám představuje:




hCG screeningový test

kat.č. 008A041

pro kvalitativní specifické stanovení lidského choriogonadotropinu t.j. ke zjištění časného těhotenství od 7-10 dne, s citlivostí od 25 mIU/ml.

Test lze provádět v ordinaci praktického lékaře, ze vzorku moče bez potřeby dalšího laboratorního vybavení. Test lze provést i ze séra, kdy je třeba malé centrifugy.

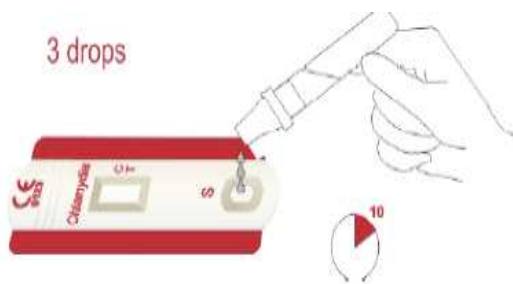

linii v místě testu označeném T. Nepřítomnost barevné linie v tomto místě znamená negativní výsledek.

Charakteristika testu: - dle firemních materiálů:

Senzitivita a specificita: Test ultimed detekuje hCG ve vzorku séra nebo moči při koncentraci hCG= 25mIU/ml, nebo vyšší. Test je standardizován podle WHO standardů.

Možnost zkřížených reakcí byla ověřena přidávkem 300 mIU LH, 1000 mIU FSH, 1000 IU TSH jak k pozitivním, tak negativním vzorkům hCG. Nebyly pozorovány žádné zkřížené reakce.

Interference: Byly ověřeny možnosti interference sloučeninami, které se mohou vyskytovat ve vzorcích séra nebo moči: *Acetaminophen 20mg/ml, Kys.acetylsalicylová 20mg/ml, Kys.askorbová 20 mg/ml, Atropin 20mg/ml, Billirubin 40 mg/dl (706,7 umol/l), Triglyceridy 1200mg/dl (13,5mmol/l), Kofein 20mg/ml, kys.gentisová 20mg/ml.* Žádná z uvedených sloučenin neovlivnila výsledky jak pozitivních tak negativních vzorků hCG.

Balení, expirace, návody a další testy:

Balení po 1 ks, Český návod je součástí dodávky. Testy dodáváme přibližně s roční expirací.

Další širokou nabídku rychlých testů včetně návodů najdete na <http://www.jktrading.cz> /
Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..

Cena za kus: 19,-Kč včetně 10% DPH,
při odběru nad 50 ks: cena 17,- Kč/test včetně 10% DPH

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Východní a střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604

Západní, severní a jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603

Morava – Ing. Žurová: 777 929 623

Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o, Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín,

tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772, email:

praha@jktrading.cz