



NORMÁLNÍ	ZVÝŠENÁ
KÓD 18001 1 x 0,5 mL	KÓD 18002 1 x 0,5 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C	
Pouze pro laboratorní <i>in vitro</i> diagnostiku	

HEMOGLOBIN A1C KONTROLA (NORMÁLNÍ, ZVÝŠENÁ)

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Hemoglobin A_{1c} kontrola je určen pouze pro kontrolu kvality a je dodáván v navrhovaných intervalech akceptovatelných hodnot.

SLOŽENÍ

Hemoglobin A1C kontrola. Pro 0,5 mL. Lyofilizovaný hemolýzát lidské krve určený ke kontrole kvality v klinických laboratořích. Neobsahuje konzervační látky, které by mohly interferovat při testování.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8°C.

Lyofilizovaná kontrola je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky.

Rozpuštěná kontrola je stabilní alespoň 7 dní při 2-8°C. Pro delší skladování zamrazte. Opakovaně nezmrazovat.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 0,5 mL destilované vody. Koncentrace komponentů závisí na přesnosti rekonstituce.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechejte jí stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Opatrně promíchejte, zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění lyofilizátu.
5. S rozpuštěnou kontrolou zacházejte a pracujte jako se vzorkem pacienta.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Koncentrace hemoglobinu A1C vyjádřena v mmol / L a v % je uvedena na štítku lahvičky. Hodnota je sledovatelná referenční metodou doporučenou IFCC. Sledovatelnost výsledků může být zajištěna pouze v případě použití reagentů BioSystems a doporučených postupů měření. Navrhované intervaly přijatelných hodnot byly vypočteny z předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě a jsou uvedeny pouze pro orientaci. Každá laboratoř by měla stanovit vlastní parametry přesnosti.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 9.5.2019.

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese:

www.biosystems.es

Český návod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

ČR : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informační centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166