



kód 18036 1 x 20 mL	kód 18037 10 x 20 mL
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích	

MOČOVÁ KONTROLA

POPIS PRODUKTU

Močová kontrola je určena pouze pro kontrolu kvality a je dodávána v navrhovaných intervalech akceptovatelných hodnot.

SLOŽENÍ

Močová kontrola. Pro 20mL. Lyofilizovaná lidská moč obsahující uvedené koncentrace jednotlivých složek a je určena ke kontrole kvantity v klinických laboratořích. Neobsahuje žádné konzervační prostředky, které by mohly interferovat s testem.

Komponenty lidského původu byly testovány a shledány negativními na přítomnost protilátek proti HIV a HCV, jako i na antigen Hbs. Přesto zacházejte se sérem jako s potencionálně infekčním materiálem.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 20,0 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti postupu rekonstituce.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechejte jí stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Opatrně promíchejte, zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění lyofilizátu.
5. S rozpuštěnou kontrolou pracujte jako se vzorkem pacienta.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8°C.
Lyofilizovaná kontrola je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky. Komponenty v rozpuštěné kontrole jsou stabilní alespoň 5 dní při 2-8°C. Pro delší skladování zamraďte. Lze zamrazit jenom jednou.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Hodnoty včetně návazností pro jednotlivé komponenty jsou uvedeny v tabulce originální příbalové informace.
Uvedené hodnoty lze získat pouze za předpokladu používání reagensů BioSystems a doporučeného postupu v návodech.
Doporučené intervaly byly vypočítány na základě předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě stanovení. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Každá laboratoř by si měla stanovit své vlastní parametry přesnosti.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 23.1.2018.
Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese: www.biosystems.es

Český návod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha5, tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

ČR : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informační centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

VÝROBCE

BioSystems S.A. Costa Brava 30, Barcelona (Spain)
ISO 13485 - TÜV Rheinland - Reg.: SX 60010383 0001
ISO 9001 - TÜV CERT - Reg.: 01 100 6696