

Hladina I	Hladina II
kód 18040 3 x 1 mL	kód 18041 3 x 1 mL
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích	



## LIPOVÉ KONTROLNÍ SERUM I,II

### POPIS PRODUKTU

Lipidové kontrolní sérum je určeno pouze pro kontrolu kvality a je připraveno v doporučených a akceptovatelných hodnotách.

### SLOŽENÍ

**Lipidové kontrolní sérum. (pro 1,0ml)** Lyofilizované lidské sérum obsahuje komponenty v koncentracích vyhovujících kontrole kvality v klinických laboratořích. Neobsahuje konzervanty, které by mohly ovlivnit stanovení.

Komponenty lidského původu byly testovány a shledány negativními na přítomnost protilátek proti HIV a HCV, jako i na antigen Hbs. Přesto zacházejte se sérem jako s potenciálně infekčním materiálem.

### PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 1,00 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti postupu rekonstituce.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechejte jí stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Opatrně promíchejte, zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění lyofilizátu.
5. S rozpuštěným kontrolním sérem zacházejte a pracujte jako se sérem pacienta.

### SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte při 2-8°C.

Lyofilizované lipidové kontrolní sérum je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky.

Komponenty v rekonstituovaném materiálu jsou stabilní alespoň 7 dní při 2-8°C. Pro delší skladování zamraďte. Nemrazit opakovaně.

### SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Hodnoty pro jednotlivé komponenty včetně návazností jsou uvedeny v tabulce originální příbalové informace. Doporučené intervaly byly stanoveny na základě předchozích zkušeností v mezilaboratorní variabilitě stanovení a jsou pouze orientační. Každá laboratoř by si měla stanovit své vlastní parametry přesnosti. Dohledatelnost hodnot může být v souladu pouze tehdy, pokud jsou používány reagenty BioSystems s doporučeným postupem stanovení.

### UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 23.1.2018.

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí. Návaznosti kalibrátorů, kontrol jsou uvedeny v tabulce hodnot. Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese: [www.biosystems.es](http://www.biosystems.es).

Český návod je k dispozici na: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)

#### Výhradní distributor:

**ČR** : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha5, tel.: +420 257 220 760

**SK** : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

**ČR** : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

**SK** : Toxikologické informační centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

#### VÝROBCE

**BioSystems S.A.** Costa Brava 30, Barcelona (Spain)  
ISO 13485 - TÜV Rheinland - Reg.: SX 60010383 0001  
ISO 9001 - TÜV CERT - Reg.: 01 100 6696