

KONTROLA STERILIZACE

Chemické indikátory

CI- ChemoStrip 134 °C / 121 °C

Chemický indikátor pro monitorování sterilizace vlhkým teplem. monitoruje čas, teplotu i kvalitu páry.

KATALOGOVÉ ČÍSLO:

(7501/7502)
CI-ChemoStrip 134 °C / 121 °C

POČET KS V BALENÍ: 250

POPIS A PRINCIP TESTU:

- CI-ChemoStrip je oboustranně laminovaný proužek o velikosti 89 x 18 mm.
- Jde o chemický **indikátor-emulátor typ 6** podle ČSN EN ISO 11140-1. Je testem sterilizace pro 134 °C i pro 121 °C.
- Indikátor je určen pro parní sterilizátory s frakcionovaným prevakuumem.
- Monitoruje teplotu, čas i kvalitu páry páry.
- Indikátor má výbornou stabilitu před i po expozici.

CI-CHEMOSTRIP 134°C/121°C

VYHODNOCENÍ

VYHOVUJE	NEVYHOVUJE
CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace úspěšná – podmínky sterilizace splněny	CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace neúspěšná-sterilizační parametry nevyhovující
CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace úspěšná – příliš vysoká teplota	CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace neúspěšná (nedostatečný tlak / krátký čas expozice / nízká teplota)
CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace úspěšná – mokrá pára	CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace nevyhovující (nedostatečný tlak / krátký čas expozice / nízká teplota)
CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace úspěšná – delší čas expozice	CI-CHEMOSTRIP-134°C/121°C ISO 11140-1 TYPE 6 (STEAM) 4 MIN/134°C - 18 MIN/121°C MesaLabs LOT:000000 0000-00 ACCEPT IF GREEN Sterilizace neúspěšná (nedostatečný tlak / krátký čas expozice / nízká teplota)

POUŽITÍ:

- Vložte ChemoStrip do sterilizačního obalu s materiálem nebo do kontejneru.
- Odstartujte příslušný sterilizační program.
- Po skončení sterilizačního cyklu vyjměte obal, ve kterém je indikátor a vyhodnoťte barevnou změnu indikátoru
- Zaneste výsledky do sterilizačního deníku.

HODNOCENÍ:

Parametry sterilizace splněny: kolečko purpurové barvy v pravé části testu **zcela** změnilo barvu z purpurové na zelenou = stejnou barvu jako ostatní text.

V případě dlouhé expozice je zelená barva kolečka sytá.

V případě mokré páry je zelená barva „rozpitá“ na okrajích.

V případě krátké expozice je zelená barva kolečka s nádechem do žluta.

Sterilizace nevyhovující: kolečko purpurové barvy změnilo barvu pouze **částečně** nebo **vůbec ne** nebo **v případě krátké expozice na červeno-hnědou.**

SKLADOVÁNÍ: v originálním obalu

na suchém místě, při pokojové teplotě 15-27 °C.

EXPIRACE: 2 roky od data výroby.

	Objednávky ČR: JK – Trading spol. s r.o. Křivatcová 421/5 155 21 Praha 5 – Zličín Tel.: +420 257 220 760 e-mail: paha@jktrading.cz	Objednávky SK: JK – Trading spol. s r.o. Dlhá 1264/43 900 31 Stupava Tel.: +421 907 670 888, 264 776 790 e-mail: jk-trading@jk-trading.sk	Více informací: Bc. Kováč 777 929 624 Ing. Žůrová 777 929 623 Ing. Kryl 777 929 604 www.jktrading.cz www.jk-trading.sk