

KH2X15-7.OY/M

Helix-PCD + Chemical indicator

simulační test - sada

Pro monitorování parních sterilizátorů



Použití

Určeno k vyhodnocení odstraňování vzduchu a pronikání páry ve velkých a malých vakuových parních sterilizátorech.

Parametry: 7 minut/134°C a 20 minut/121°C.

Standardy

Navrženo podle norem systému řízení kvality

ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

ISO 11140-1:2014, EN 867-5 a EN 285.

Klasifikace

Třída rizika 1 (ANMAT).

Charakteristika

Helix-PCD

Kovová kapsle s velkou odolností a trvanlivostí, do které se vkládá chemický indikátor určený pro tento systém. Kapsle je připojena k vysoce odolné plastové trubici o délce 1,5 m (další délky viz katalog) a vnitřním průměru 2 mm. Speciální silikonový konektor potažený vnějším konektorem.

PCD-A-7.OY

Typ 2 Chemický indikátor.

Samolepicí proužek potíštěný indikátorovým inkoustem.

Velikost: 76 x 6 mm

10 proužků na archu. Velikost: 80 x 98.5 mm.

Původní barva: žlutá.

Koncové zbarvení: tmavě hnědá/černá.

Autorizace: ANMAT (Argentinský národní úřad pro léčiva, potraviny a zdravotnické prostředky) PM-1614-4.

POZNÁMKA: Pokud se 4 políčka změní na konečnou barvu, je výsledek úspěšný, sterilizátor funguje správně. Pokud se jeden nebo více polí nezměnilo na konečnou barvu, ukazuje to na selhání průniku sterilizačního činidla, tedy na poruchu zařízení.

100 % bez obsahu toxických těžkých kovů



Podmínky prostředí při výrobě

T = 15-30 °C, RH 30-80 %.

Skladovací podmínky

T = 10-30 °C, RH 30-80 %, skladujte ve tmě.

Přepravní podmínky

Podmínky skladování by měly být přísně dodržovány.

Přepravujte v uzavřených a zpevněných krabicích, aby nedošlo k poškození.

Přeprava tohoto výrobku nepředstavuje zdravotní riziko.

Doba expirace

PCD-A-7.OY: 5 let.

Helix-PCD: 500 cyklů.

Balení

250 PCD-A-7.OY proužků na archu po 10 ks + 1 Helix-PCD + 1 bavlněný sáček.

Informace na obalu: informace o výrobci, podmínky skladování a údaje na štítku.

Označení

Na obalu výrobku: kód a popis výrobku, postup určeného použití, obchodní úprava, číslo šarže soupravy a číslo šarže CDPCD, datum výroby, datum expirace, čárový kód a datový kód.

Na sáčku helix-PCD: kód a popis výrobku, prezentace, číslo šarže, čárový kód a datamatrix kód.

Na obalu PCD-A-7.OY: kód výrobku, postup určeného použití, obchodní úprava, změna barvy, číslo šarže, datum výroby, datum použitelnosti, čárový kód a kód datamatrix.

Využití

Zdravotnictví, potravinářský, farmaceutický a lékařský průmysl.

Další důležité informace

Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití výrobku.

Upozornění

Neskladujte výrobek v blízkosti sterilizačních prostředků.

Nevystavujte tento výrobek působení EO, suchého tepla, formaldehydu ani jiným sterilizačním procesům než sterilizaci párou.

Sterilizátor nepoužívejte opakovaně, dokud změna barvy chemického indikátoru není taková, jaká je uvedena na výrobku



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk

Zpracoval: 1/2024/JJK

