

**Název výrobku: CI-BD-CHECK II****Zařízení:** typ 2 Bowie-Dick**Typ testu:** jednorázový testovací BD balíček**Bližší specifikace:** jednorázový testovací balíček s filtračními papíry a testovacím indikačním archem uprostřed o velikosti A6**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 134°C/3,5 minuty**Použití:**

1. Spustíte sterilizační cyklus, abyste sterilizátor zahřáli.
2. Umístěte balíček vodorovně na dno, do středu prázdné sterilizační komory a co nejdříve ke dveřím, nebo do místa, kde se předpokládá snížená penetrace páry, nápísem „This side up“ směrem nahoru.
3. Odstartujte program Bowie-Dick testu 134°C/3,5 min.
4. Po skončení cyklu vyjměte balíček ze sterilizátoru. POZOR, může být horký a to i jeho vychladnutí zvnějšku, pracujte opatrně, použijte rukavice. Po vychladnutí otevřete balíček pomocí papírového zipu, vyjměte indikátorový aršík a vyhodnoťte jej, Zapište předepsané údaje a uchovejte arch ve sterilizačním deníku, mimo zdroje světla.
5. Pokud je indikátorový list po vyjmutí z balíčku stále teplý, nepokládejte ho na chladný povrch – může se vrátit k původní barvě.

**Vyhodnocení:****Vyhovující cyklus:** celý obrazec indikátoru rovnoměrně změnil barvu z modré na černou.**Nevyhovující cyklus:** obrazec indikátoru se zabarvil nestejně. Případně střed zůstal zcela nezměněn – zůstal modrý. Tento stav signalizuje přítomnost zbytkového vzduchu v komoře sterilizátoru.

Ve výjimečných případech může dojít ke vzniku vzduchových bublin pod laminem indikačního archu. V tomto případě vyhodnoťte změnu barvy, jak je uvedeno výše.

Tmavě modrá barva celého indikátoru značí nedostatečný čas, teplotu, nebo nedostatečný průnik páry.

Pokud je BD zkouška nevyhovující test opakujte. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika.

**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15°C - 38°C.

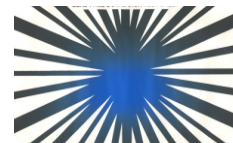
Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

**Expirace:** 3 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 11140-4**Obsah balení:** 20 kusů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Před expozicí



Správný výsledek

Nesprávný výsledek -  
nedostatečné zbarvení**Mesa France**

2 Rue Auguste Fresnel

69680 Chassieu Cedex – France

Phone: +33 (0)4 78 90 56 88

Email: [mesafrance@mesalabs.com](mailto:mesafrance@mesalabs.com)