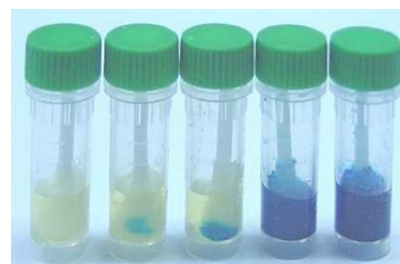
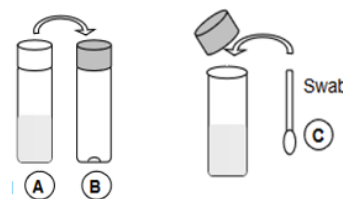


Název výrobku: HemoCheck S**Zařazení:** test účinnosti mytí**Typ testu:** detekce reziduí krevních bílkovin na chirurgických nástrojích**Bližší specifikace:** sada lahvíček a stěrového tamponu, detekční limit 0,1 µg. Test je založen na enzymatické reakci, při níž je využit vysoký obsah peroxidázy v krvi.**Typ mytí:** ruční nebo strojové (MDZ), kontroly čistoty povrchů, například stěny komor mycích automatů, UZV čističek, pracovních ploch, setovacích ploch, instrumentária apod.**Použití:**

1. Vyměňte testovací soupravu z chladničky, pokud ji tam skladujete, a ponechte temperovat na pokojovou teplotu
2. Vlhké plochy setřete suchým tamponem, pokud jsou plochy suché, navlhčete stěrový tampon kapkou vody, nikdy však chlorovanou vodou!
3. Důkladně setřete referenční plochu nástroje nebo jiné testované plochy
4. Otevřete lahvičku s indikátorem (A) a obsah přelijte do lahvičky a aktivátorem (B)
5. Testovací tampon použitý ke stěru (C) ponořte do lahvičky s připravenou směsí (B), zašroubujte a důkladně protřepejte.
6. Výsledek je k dispozici již za 30 sekund

Vyhodnocení: pokud zůstane barva tekutiny žlutá, je výsledek negativní a na nástroji nebyly detekovány žádné zbytky krve. Mycí cyklus proběhl v pořádku. Světle modrozelená barva detekuje malá množství. Jakékoliv zabarvení do modra detekuje větší pozůstatky krve na nástroji, resp. na referenční ploše. Výsledek porovnejte s tabulkou.**Důležitá upozornění:** zbytky krve se na nástrojích nacházejí často v kloubech. Stěry přiloženým tamponem tak nemusí být dostatečné kvůli úzkým štěrbinám. Můžete použít některý z tamponů, které jsou k dispozici pod objednacími kódy 8293, 8294, 82920 atd. Uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění tamponu před použitím, výsledky by mohly být zkreslené. Stěrové tampony před používáním udržujte suché! Kontakt s pokožkou může výsledky do značné míry zkreslit! Test proveďte ihned po provedení stěru, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledku. Oxidační činidla jako chlór a chlornany, obsažené v některých detergentech a dezinfekčních přípravcích, vedou taktéž k barevné reakci a výsledky tudíž nejsou relevantní. Provádějte i pozitivní kontrolu stěrem testovací skvrny například TOSI testu.**Skladování:** v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před znečištěním a teplem**Expirace:** 18 měsíců**Klasifikace:** ČSN EN ISO 15883**Uvolňování toxických látek:** žádné, které by mohly ohrozit zdraví nebo vlastnosti výrobku.**Obsah balení:** 12 sad - 12 lahvíček A, 12 lahvíček B, 12 stěrových tamponů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 5/2024/JK

0,0	0,1	1	10	100
µg	µg	µg	µg	µg


 PEREG GmbH
 Porschestrasse 12
 D-84478 Waldkraiburg
 +49 8638 84100