

Kód výrobku: 8298, 8299, 82991, 8296, 82961

Distributor:

Název výrobku: TOSI® FlexiCheck 8298 – testovací proužky
 TOSI® FlexiCheck 8299 – silikonová hadice s tělískem
 TOSI® FlexiCheck 82991 – modrá hadice s pouzdrům
 TOSI® FlexiCheck 8296 – adaptér pro Wassenburg
 TOSI® FlexiCheck 82961 – adaptér pro Olympus

Zařazení: test pro kontrolu a validaci mytí a čištění dutých nástrojů s pružnou dutinou v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ)

Typ testu: kovový proužek s patentovanou testovací skvrnou k použití s tělískem s hadicí o délce 1 m

Bližší specifikace: proužek z nerezového materiálu se dvěma testovacími skvrnami, které mají podobné složení, jako lidská krev a tkáň, obsahují hemoglobin, albumin, fibrinogen a trombin. Test se vkládá do tělíska, jehož součástí je 1 metr dlouhá hadice

Typ mytí: strojové (MDZ) s tryskami pro napojení dutých součástí instrumentária nebo dutinových nástrojů. Proužek omezuje víření vody a tím simuluje ztížení procesu mytí v dutinách nástrojů.

Doporučené parametry:

Druh detergentu	Koncentrace (g/l)	Doba mytí (min)	Teplota (°C)
Alkalický (pH 11,5)	<5	5	<60
Neutrální s enzymy	10	10	45
Neutrální bez enzymů	7-10	10	45 - 60

nebo podle doporučení výrobce endoskopů

Použití:

1. Rozšroubujte kovové tělísko
2. Z ochranné fólie vyjměte velmi opatrně testovací plíšek, nesmíte se přitom dotknout testovacích skvrn
3. Vložte test do tělíska – do části s užším průměrem – a tělísko zašroubujte. Hadici pak připojte na trysku mycího zařízení. Používejte odpovídající adaptér.
4. Naplňte vsázku a spusťte mycí program.
5. Po dokončení cyklu testy vyjměte a vyhodnoťte

Vyhodnocení: k vyhodnocení použijte připojenou tabulku. Optimálním výsledkem je čistý lesklý povrch bez reziduí testovacích skvrn.

Důležitá upozornění: pokud jsou výsledky neuspokojivé, proces opakujte s menším objemem vsázky. Pokud se problém nedaří odstranit, vyzkoušejte jiný typ chemického přípravku. Kontaktujte servisního technika.

Skladování: v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C.

Při skladování chraňte indikátory před světlem, zdroji tepla a chemických látek.


Expirace: 18 měsíců od data výroby. Po datu uplynutí doby použitelnosti výrobek nepoužívejte.

Uvolňování toxických látek: žádné, které by mohly ohrozit zdraví nebo vlastnosti výrobku.

Klasifikace: ČSN EN ISO 15883

Obsah balení: 25 ks (8298)

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 4/2024/JK

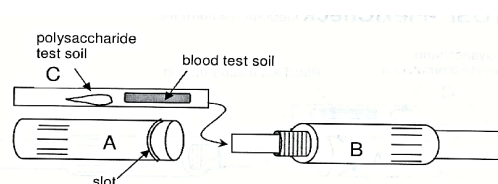

Optimální výsledek – obě skvrny jsou dokonale odmyty



Nevyhovující výsledek – polysaccharidová skvrna je odstraněna, ale zůstaly viditelné pozůstatky fibrinu, zkontrolujte fyzikální parametry, jako čas, teplotu, dávkování



Nevyhovující výsledek – polysaccharidová skvrna je odstraněna jen částečně, zkontrolujte kvalitu vody i ostatní parametry



Nevyhovující výsledek - polysaccharidová skvrna je odstraněna, ale zůstaly viditelné pozůstatky ve vodě rozpustných bílkovin, zkontrolujte teplotu vody a účinnost detergentu



Nevyhovující výsledek – obě skvrny zůstaly téměř beze změny. Znamená to, že účinnost mytí je zanedbatelná. Zkontrolujte připojení FlexiChecku na trysku, revidujte zvolený program



PEREG GmbH
 Porschestraße 12
 D-84478 Waldkraiburg
 +49 8638 84100