

BOWIE-DICK

Jednorázový testovací balíček



popis výrobku

Funkční testovací balíček Bowie Dick je určen pro parní autoklávy s vakuovým systémem (tzv. Bowie Dick program) za účelem ověření účinnosti odstraňování nekondenzujících plynů z komory, testování těsnosti komory a jejího uzavření a také schopnosti pronikání páry do hůře dostupných míst. Včasně upozornění Bowie Dick testovacího archu detekuje již první příznaky poruchy sterilizátoru. Je umístěn mezi listy speciálního papíru a pěny, které vytvářejí kritické podmínky pro sterilizaci. Test by měl být prováděn každý den, před zahájením rutinního používání sterilizátoru. Cyklus by měl být spuštěn s prázdnou komorou, aby se zjistily případné nekondenzující plyny, které mohou existovat v přívodních částech zařízení.

Výsledek testu se získá okamžitě a snadno se interpretuje - změna barvy indikátoru ze žluté na černou. Chemické látky použité k výrobě zkušebního balení neobsahují olovo a jsou zcela bezpečné pro životní prostředí.

Informace o testu najdete ve čtyřech jazycích: polštině, angličtině, němčině a ruštině.

Každý balíček je vložen do přepravního obalu.



aplikace a interpretace výsledku

Testovací balíček umístíte do předem zahřáté prázdné sterilizační komory a spustíte BD cyklus na 3,5 min při 134°C.

Po ukončení cyklu vyjměte balíček ze sterilizátoru a nechte schládnout na pokojovou teplotu abyste jej mohli bezpečně otevřít a vyjmout testovací arch k vyhodnocení.

Testovací arch i indikátor na vnějším štítku změní při správně provedeném testu barvu ze žluté na černou.



použití

Balíček je použitelný ve všech parních sterilizátorech s BD programem

normy

ISO 11140 - 1 typ 2
EN 867-1
EN 867-4
AAMI ST 60

skladování a expirace

Skladujte na suchém místě,
Při teplotě 10°-40°C.

Datum expirace je
vyznačeno na štítku na
balíčku

katalogové číslo a balení

BOWIE-DICK test pack:
BDST
100 ks/bal