

SIM-250

Indikátory parní sterilizace
Multiparametrové chemické indikátory

popis výrobku

Víceparametrové chemické indikátory pro proces parní sterilizace jsou navrženy ve formě papírového proužku se třemi perforacemi, na který byl po celé délce nanesen modrý indikátorový inkoust. Chemický indikátor typu 4 reaguje na dvě nebo více kritických proměnných procesu parní sterilizace. Reakční doba indikátoru je odpovídá zvolenému speciálnímu inkoustu, který je netoxický, neobsahuje olovo ani těžké kovy. Po úspěšně provedeném procesu mění indikátor barvu z modré na černou. Parametry: teplota 121 °C-134 °C a čas 20 min. - 3,5 min a více.

technické údaje

- 1,70cm x 20,50cm (250 indikátorů v balení) nebo
- 1,70cm x 10,25cm (500 indikátorů v balení) nebo
- 1,70cm x 5,10cm (1000 indikátorů v balení)

Není nutné indikátory krájet nebo dělit, použití závisí na velikost sterilizovaného materiálu.

Informace o typu indikátoru podle normy ISO je uvedena na každém indikátoru, a to i na těch nejmenších. Stejně informace jsou vytištěny také na krabici.

aplikace a interpretace

Indikátorový proužek SIM-250 by se měl používat nejen při každém cyklu, ale také při každé sadě a balení, které se má sterilizovat. Indikační proužek by měl být umístěn uvnitř této sady nebo balení. Vsázka by měla být zpracována podle doporučení výrobce parního sterilizátoru. Po úspěšně provedeném sterilizačním procesu by se měl ověřit výsledek - správný výsledek je, když se barva indikátoru změní z modré na černou.

použití

Parní sterilizátory všech výrobců a všech výkonů.




V každém balení je 250 proužků o čtyřech dílčích částech.



3 způsoby použití:

- nedělený,
- rozdělený na 2 části,
- rozdělený na 4 dílčí části.

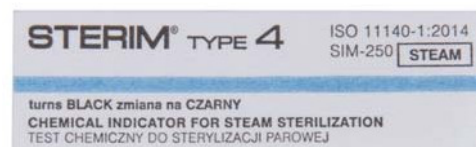

Informace o typu indikátoru podle normy ISO je uvedena na každém indikátoru, a to i na dílčích částech

Normy

ISO 11140-1:2014, typ 4

Skladování a expirace

Skladujte v originálním obalu
Při teplotách 15-30°C.
Výsledné zbarvení indikátoru musí být
Chráněno před přímým slunečním světlem.
Datum výroby a expirace je uvedeno na
každém jednotlivém balení.

Značení a obsah balení

SIM-250:
Ref. SIM-250
250x4 ks/bal
(1000 jednotlivých dílčích částí)