



PRODUKTOVÁ SPECIFIKACE Getinge Assured

Wash Monitor F Holder - Flexibilní zkušební tělísko. Objednací číslo: 503.865.100

Držák Getinge Wash Monitor F je pomocné zařízení pro rutinní monitorování automatických mycích procesů dutých zdravotnických prostředků v myčkách – dezinfektorech a ultrazvukových myčkách.

Používejte pouze držák mycího monitoru F s indikátory Wash Monitor F/R (v mycích dezinfektorech) nebo indikátory Wash Monitor U/L (v ultrazvukových myčkách).

Wash Monitor F/R nebo Wash Monitor U/L se vloží do Wash Monitor F Držák, simuluje znečištěné flexibilní dutiny zdravotnických nástrojů.

Doplňující výrobky nutné k provedení testu:

Objednávací číslo: 503.865.300 - Wash Monitor U/L test pro ultrazvukové myčky – není součástí balení

Objednávací číslo: 503.865.000 - Wash Monitor F/R test pro dezinfektory – není součástí balení

Výkonnostní charakteristika:

Test Wash Monitor F/R nebo Wash Monitor U/L se umístí do zkušební tělíska Wash Monitor F Holder. Poté se zkušební tělísko připevní ke konektoru luer-locku na stojanu myčky.

Fyzikální vlastnosti:

- Zkušební tělísko Wash Monitor F je vyrobeno z leštěné nerezové oceli a silikonu.
- Rozměry: 1067 mm X 11 mm
- Hmotnost: 73 g
- Materiál podkladu: Elektro leštěná nerezová ocel AISI 304 a silikon splňující normy kvality podle evropské specifikace ST-EC-60-00

Skladování: v suchém prostředí

Doba použitelnosti: neomezená

Balení: 1 ks tělíska

Klasifikace podle standardů: není

Výrobce:

Getinge AB Lindholmspiren 7 P.O. Box 8861 SE-417 56 Göteborg Sweden +46 (0)10 335 0000



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk