

Kód výrobku: BlackCheck

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)**Název výrobku:** CI-BlackCheck C**Zařazení:** typ 4 vsázkový**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** zalaminovaný papírový proužek s testovacím polem**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 121°C/10 min, 134°C/3,5 min**Popis výrobku:** papírový proužek s testovacím polem ve tvaru písmene V, které se zbarví v závislosti na sterilizačních podmínkách v parních sterilizátorech s frakčním vakuem**Procesní charakteristika:** Vsázkový test se provádí každý den v naplněné komoře sterilizátoru. Před expozicí je indikátorový obrazec testu žlutý, po správné expozici při splnění všech parametrů sterilizace je obrazec tmavě hnědý až černý. Zelená nebo šedá barva signalizují nedostatečné splnění podmínek parní sterilizace.**Fyzikální charakteristika:** rozměr 90 mm x 19 mm**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 15 - 27°C.

Při skladování po expozici chraňte indikátory před přímým slunečním světlem.

**Poznámka:** nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo správnou funkci indikátoru. Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.**Expirace:** 3 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 15882**Obsah balení:** 250 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

Mesa France  
2 Rue Auguste Fresnel  
69680 Chassieu Cedex – France  
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
Email: [mesafrance@mesalabs.com](mailto:mesafrance@mesalabs.com)