

Název výrobku: CI-Integraph

Zařazení: typ 5 vsázkový

Typ testu: chemický

Bližší specifikace: laminovaný proužek s testovacím polem

Typ sterilizace: vlhké teplo/pára

Expozice: 121°C/134°C

Popis výrobku: papírový proužek s několika testovacími poli, která se zbarvují v závislosti na postupujících sterilizačních podmínkách v parních sterilizátorech s frakčním vakuem

Procesní charakteristika: Vsázkový test se provádí každý den v naplněné komoře sterilizátoru. Před expozicí je indikátorový obrazec testu purpurově červený, po správné expozici při splnění všech parametrů sterilizace je obrazec zelený. Zbytky purpurového zbarvení signalizují nedostatečné splnění podmínek parní sterilizace.

Fyzikální charakteristika: rozměr 59 mm x 19 mm

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 15 - 27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Poznámka: nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo správnou funkci indikátoru. Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.

Expirace: 3 roky od data výroby

Klasifikace: ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 15882

Obsah balení: 250 ks

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 8/2023/JK



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com