

Kód výrobku: RM/100

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk

Název výrobku: Releasat® Red media

Zařazení: biologické indikátory – kultivační půda

Typ testu: pro použití s biologickým indikátorem

Bližší specifikace: modifikované kultivační médium na bázi sójového kaseinu pro použití s biologickými indikátory Mesa

Typ sterilizace: etylenoxid, suché teplo (proudící horký vzduch)

Expozice: dle národních standardů

Inkubace: 7 dní

Popis výrobku: speciální kultivační médium pro rychlý růst spór na bázi sójového kaseinu s pH indikátorem fenolová červeň. Je speciálně navrženo pro použití s biologickými indikátory Mesa, dodává se v jednorázových zkumavkách pro snadnou aseptickou manipulaci s výrobkem. Výsledek je vizuální, změnou barvy.

Procesní charakteristika: Vybrané biologické indikátory, které prošly sterilizačním cyklem, se vloží asepticky do kultivačního média. Pokud zůstane médium po celou dobu čisté, čiré, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná

Fyzikální charakteristika: Zkumavky o průměru 16 mm, délka 100 mm
Objem každé 3,6 ml

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 10 - 27°C.

Při skladování chraňte před přímým slunečním světlem a před vysušením.

Expirace: 1 rok od data výroby

Klasifikace: každá zkumavka obsahuje číslo šarže a datum expirace

Obsah balení: 100 kusů

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 8/2023/JK



Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com