



Produktový list

Dezinfekce vhodná pro všechny povrchy a objekty.
Připravena k přímému použití.

multiGREEN® Surface disinfection

Vlastnosti produktu

- Testováno jako **zdravotnický prostředek** – nedráždí kůži
- Dezinfekční prostředek na povrchy a předměty
- **Bez alkoholů, fenolů, aldehydů a kvartérních amoniových solí**
- Nehořlavý, nedráždivý, neleptá, není toxický pro plíce
- Nedráždí sliznice, dermatologicky testován (+++)
- Dobrý dezinfekční a čistící výkon
- Bezpečný podle potravinového práva
- Rozpuštění biofilmu v klimatizačních systémech s přetrvávajícím účinkem



Pro multifunkční použití

- Zdravotní a ošetrovatelská péče
- Instituce a průmysl
- Veřejný život a armáda
- Hygiena při práci
- Veterinární hygiena
- Maloobchod

Osobní ochranné prostředky:

nevýžadují se (ani rukavice ani brýle).

Oblasti použití

Povrchová dezinfekce multiGREEN® zabraňuje přenosu zárodků a přerušuje infekční řetězce. Tento biologicky rozložitelný zdravotnický prostředek je zvláště vhodný pro povrchy a předměty, které musí být několikrát denně dezinfikovány.

Povrchová dezinfekce **multiGREEN®** je i podle potravinového práva neškodná; je vhodná pro použití na klinikách a pečovatelských zařízeních, v nemocnicích, školách, při cestování a při zpracování potravin.

Dezinfekce má efekt dekompozice biofilmu mikrobiální kontaminace a lze ji použít jako oplach, ve formě spreje nebo jako páry.

Aplikace

Povrch předmětů nebo plochy zcela zmáčejte dezinfekcí **multiGREEN®**. Nesmí vznikat suché plochy, protože plný účinek se vyvíjí pouze na vlhkém povrchu.

Poznámka: Protože je roztok na vodní bázi, měl by se používat v případě kovových předmětů pouze na povrchově upravené nebo nerezové plochy-jinak existuje riziko koroze. (V případě citlivých povrchů nejprve zkontrolujte kompatibilitu na nenápadném místě).

Účinnost

Dezinfekce **multiGREEN®** byla důkladně testována a schválena v souladu s pokyny německé společnosti pro Management hygieny DGHM / VAH a také Institutem Roberta Kocha / Berlin RKI.

Doba působení dezinfekce

Dezinfekční prostředky fungují pouze na vlhkých površích; proto: čím je doba delší, tím je výsledek lepší nebo bezpečnější.

- | | |
|--|---------|
| • Baktericidní > log 5 ₁₀ KBE | 5 min |
| • Virucidní > log 4 ₁₀ | 5 min |
| • pro nezapouzdřené viry : jako NoroV, AdenoV, ParvoV | |
| • pro zapouzdřené viry, jako. nCoronaV, chřipka A / B, EbolaV, HIV, HCV, HBV | 30 min |
| • Levurocidní | 5 min |
| • Tuberkulocidní | 240 min |

Označování podle Nařízení CLP o nebezpečných látkách

• 2 organické kyseliny - apatogenní -, 2 etylhexylsulfát sodný, CAS č. 126-92-1; EC č. 204-812-8, pepřmintový olej (Mentha Piperita), CAS č. 8006-90-4-, ES č. 282-015-4; pomocné látky.

Organické kyseliny jsou uvedeny v PŘÍLOZE 1 agentury ECHA, zaznamenávají se v rámci zjednodušeného povolení a jsou povoleny bez potenciálu nebezpečné látky. Není tedy třeba označení nebezpečnosti, protože pomocné látky jsou zastoupeny zanedbatelným procentem, ale synergicky, jako ligandy, zvyšují účinnost.

Ale:

I když nepotřebujete osobní ochranné pomůcky, jako např. bezpečnostní ochranné brýle a ochranné rukavice, v případě přímého zásahu oka může jít o nebezpečný kontakt (stříknutí do očí, nebo na oční sliznice), který může způsobit podráždění očí.

Při přímém kontaktu s očima: Oplachujte vodou jemně a důkladně několik minut. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Dále vyplachujte vodou.

Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Roztok může způsobit alergické reakce. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Před použitím si přečtěte štítek na obalu.**

Složení

100 g roztoku obsahuje:- 0,18 g kyseliny L - (+) mléčné, 0,06 g kyseliny mravenčí, přírodní nebo přírodně identické pomocné látky.

Odborná posouzení

- Prof. Dr. med. H.-P. Werner, HygCen Germany GmbH, Schwerin
- Dipl.-Biol. T. Koburger, Hygiene Nord GmbH, Greifswald
- Dr. med. Werner Voss, Dermatest GmbH, Münster
- Dr. Ralph Derra, ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH, Aschaffenburg [Food conformity]

• Výpis I Schválení I Registrace

- Zdravotnický prostředek třídy IIa
- Biocidní přípravek

Chemická a fyzikální data

- vzhled roztoku: slabě nazelenalá kapalina
- hodnota pH 2,2 + I: 0,25

Dodávané balení

- 500 ml láhev s pěnovým dávkovačem
- další obaly na vyžádání (je možné dodat i 1000 litrový kontejner)

Údaje pro objednávku

Katalogové číslo	Název	Cena za kus bez DPH [Kč]	Cena za litr (přepočet) [Kč]
mG9F	Povrchová dezinfekce (hranatá lahev), 500 mL	311,00	621,60
mG19F	Povrchová dezinfekce, 1L	567,00	567,00
mG13F	Povrchová dezinfekce, 5L	1995,00	399,00

© 2020 · Made in Germany



Supplier: ulti med Products (Deutschland) GmbH
Reeshoop 1 • D-22926 Ahrensburg | Germany
QA acc. to EN ISO 13485:2016 and CE-marked by TÜV SÜD 0123
Tel.: +49 4102 8009-0
info@ultimed.de



Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623