



Nazální odběr  
vzorku a před-  
plněné ampulky  
s pufrem

## Test NADAL® COVID-19 Ag

Rychlý test pro detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 v lidských nazálních, nazofaryngeálních a orofaryngeálních vzorcích

**Antigenní test COVID-19 je možné provést také za použití nazálního výtěru**

Nové studie ukázaly, že test NADAL® COVID-19 Ag lze provést také za použití vzorků nazálního výtěru, jehož odběr je pro pacienty mnohem příjemnější.


Test NADAL® COVID-19 Ag detekuje virus přímo zjištěním přítomnosti specifických proteinů SARS-CoV-2, a tím využitím detekce antigenu vyplňuje diagnostickou mezeru. Nukleokapsidový protein (N) je ideální pro detekci viru, protože je ve viru velmi hojný a dostatečně specifický pro SARS-CoV-2. Je to jeden ze 4 nejdůležitějších strukturálních proteinů a podílí se na replikaci, transkripci a obalení virového genomu.

### Test NADAL® COVID-19 Ag




Test NADAL® COVID-19 Ag je imunochromatografický test s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 v lidských nazálních, nazofaryngeálních nebo orofaryngeálních vzorcích. Test slouží jako pomůcka ke stanovení diagnózy infekce virem SARS-CoV-2. Mějte na vědomí, že se koncentrace virových nukleoproteinových antigenů může v průběhu onemocnění lišit a může klesnout pod hranici detekce testu. Možnou nakažlivost testovaných osob nelze vyloučit na základě negativního výsledku testu.

### Stručný přehled Vašich výhod:

- ✓ Optimalizované provedení testu
- ✓ Nyní je možné použít také vzorky nazálního výtěru
- ✓ Předplněné ampulky s pufrem
- ✓ Vysoká specifita
- ✓ Vysoká senzitivita
- ✓ Rychlé a spolehlivé výsledky za pouhých 15 minut
- ✓ Skladování při pokojové teplotě
- ✓ Všechny komponenty testu – včetně sterilních tampónů – jsou součástí dodávky
- ✓ Žádná křížová reaktivita se sezónními koronaviry (jako hCoV-229E, -NL63 nebo -OC43) nebo chřipkovými viry (jako influenza A/B)

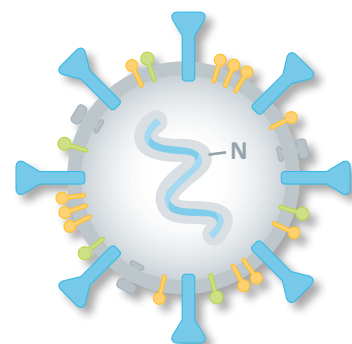


## Odběr vzorku

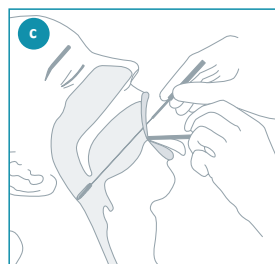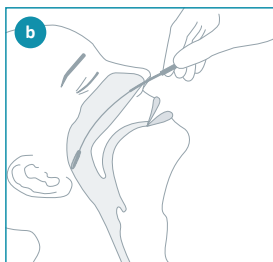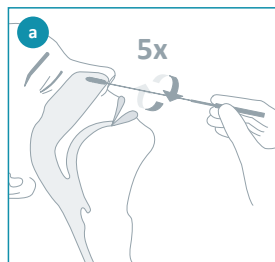


- a **Nazální výtěr**  
nebo
- b **Nazofaryngeální výtěr**  
nebo
- c **Orofaryngeální výtěr**


## Odstranění diagnostické mezery – podobná doba detekce jako PCR

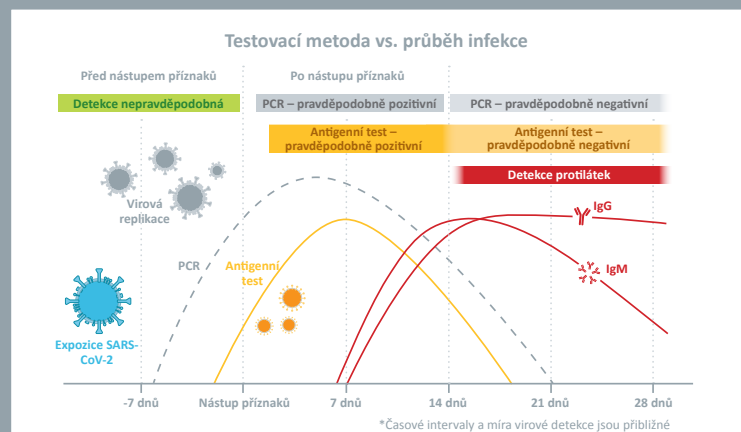

## Provedení testu

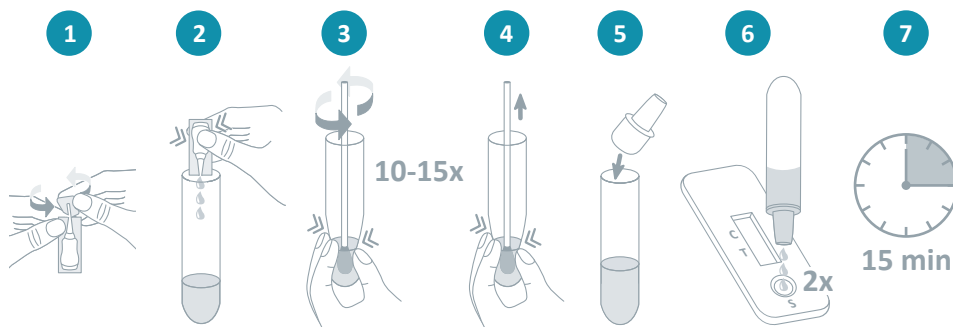

## Vyhodnocení výsledků

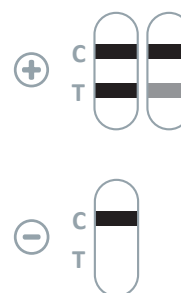

Podrobnější informace naleznete v návodu k použití.

## Test NADAL® COVID-19 Ag

Rychlý test pro detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 v lidských nazálních, nazofaryngeálních nebo orofaryngeálních vzorcích

Produkt	Vzorek	Senzitivita	Specifická	Obj. č.	Velikost balení
Test NADAL® COVID-19 Ag	Nazální, nazofaryngeální nebo orofaryngeální vzorky	≤ 97,56 %* *rozsah Ct 20-30	> 99,9 %	243103N-20	20 testů v balení

Sada obsahuje testovací kazety • sterilní tampóny • extrakční zkumavky vč. špiček • držák na činidla • předplněné ampulky s puřem • návod k použití

Náš český tým Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy na telefonním čísle **800 143 685** (bezplatné číslo z pevné linky) nebo na [czech@nal-vonminden.com](mailto:czech@nal-vonminden.com)

Další informace:



We help you care!

