

IT-048

Lepicí páska s indikátorem parní sterilizace
Procesové chemické indikátory

popis výrobku

Samolepící páska z krepového papíru potažená suchým lepidlem na bázi přírodního kaučuku na rubové straně a indikačním inkoustem pro parní sterilizaci na straně lícové. Chemický indikátor typu 1 reaguje na proces parní sterilizace. Reakční doba indikátoru je odpovídá zvolenému speciálnímu inkoustu, který je netoxický, neobsahuje olovo ani těžké kovy. Po úspěšně provedeném procesu mění indikátor barvu z bílé na tmavě šedou. Parametry: teplota 121 °C/20 nebo 134 °C/3,5 min a více.

technické údaje

Parametr	Jednotka	Hodnota
tloušťka	mm	
přilnavost kovů	N/25 mm	8
pevnost v tahu	N/25 mm	90
prodloužení	%	7
pevnost rozp. a eroze	dobrá	
odolnost vlhko a teplo	vynikající	
manipulace	vynikající	

aplikace a interpretace

Páska se používá k uzavření balíků zdravotnického materiálu určených ke sterilizaci. Indikátor odliší jednotlivé balíky, které prošly expozicí od těch, které ještě expozicí neprošly. Výsledná změna barvy je z bílé na tmavě šedou až černou. Výsledná barva se od uvedeného zbarvení může lišit, není to však považováno za závadu.

použití

Parní sterilizátory všech výrobců a všech výkonů.



Před expozicí



Po expozici



Normy

ISO 11140-1:2014, typ 1

Skladování a expirace

Składujte v originálním obalu
Při teplotách 15-30°C.
Výsledné zbarvení indikátoru musí být
Chráněno před přímým slunečním světlem.
Datum výroby a expirace je uvedeno na
každém jednotlivém balení.

Značení a obsah balení

IT-048:
Ref. IT-048
1 ks, 48 v balení